

ISORAPID® Floor

Dezinfectant concentrat pentru suprafete extrem de economic. Din un litru de produs concentrat se obtin 200 litri solutie de lucru.



SPECTRU DE ACTIVITATE/TIMPI DE EXPUNERE

Bactericid	0.5% in 15 min.
Tuberculocid	0.5% in 30 min.
	2% in 15 min.
Levuricid	0.5% in 15 min.
Virusuri cu invelis	1% in 15 min.
BVDV	0.25% in 5 min.
Virusul Hepatitei B	1% in 15 min.
Virusul Hepatitei C	0.25% in 5 min.
HIV	1% in 15 min.
Vaccinia virus	1% in 15 min.

In conformitate cu normele europene EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, si directivele and RKI (Institutul Robert Koch) /DVV.



Ambalaj

ISORAPID® Floor

Flacon 1 litru cu capac gradat in interior

Canistra 5 litri



Beneficiile utilizarii acestui produs

Prezinta inalte proprietati de curatare

Curata si dezinfecteaza pavimentele intr-o singura etapa.

- **Produs concentrat extrem de economic**
din 1 litru de produs dezinfectant concentrat se obtin 200 litri solutie de lucru.
- **Actiune antimicrobiana de lunga durata pe suprafetele tratate**
Efectul antimicrobian ramane dupa ce produsul se usuca, reducand in mod eficient riscul contaminarii ulterioare (produsul prezinta remanenta).
- **Compatibilitate buna cu materialele**
Produsul este recomandat pentru dezinfectia unei game variate de pavimente acoperite cu diferite materiale si suprafete pe care se pot aplica solutiile apoase.
- **Aplicare/Utilizare usoara**
Dopul prezinta marcaj pentru cantitati de 10 ml, 20 ml, 30 ml, and 40 ml.
- **Testat in conformitate cu standardele europene**

Descrierea produsului

ISORAPID® Floor este un produs dezinfectant sub forma lichida pentru stergerea si spalarea suprafetelor pe care se aplica solutiile apoase, a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi aparatura medicala si infrastructura. Datorita efectului sinergic a trei surfactanti si agenti ce cresc puterea de curatare, ISORAPID® Floor prezinta puternice proprietati de curatare si este foarte economic. Din un litru de produs concentrat se obtin pana la 200 litri solutie de lucru. ISORAPID® Floor este, de asemenea, recomandat pentru dezinfectia prin imersie/scufundare a dispozitivelor medicale mari, neinvazive, cum ar fi sticlele sau platile pentru urina.

Domeniul de utilizare: domeniul sanitar, dentar, veterinar, industria farmaceutică, saloane infrumusețare/cosmetică, agro-alimentar, transporturi, colectivități (magazine, sali fitness).

Aria de aplicare

Pentru dezinfectia prin spalare si stergere a suprafetelor pe care se aplica solutiile apoase, a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi aparatura medicala si infrastructura. Recomandat, de asemenea, pentru dezinfectia prin imersie/scufundare a dispozitivelor medicale mari, neinvazive, cum ar fi sticlele sau platile pentru urina.

- Recomandat pentru suprafete din piatra naturala, dale si PVC cat si pentru pereti, instalatii sanitare, placi faianta, banc de laborator.

Utilizare

Pentru dezinfectie, utilizati o solutie diluata cu apa in concentratie conform cerintelor. Pentru a masura cu corectitudine dozajul, utilizati capacul pentru masurarea cantitatii de dezinfectant utilizata (gradatia de jos = 20 ml, gradatia de sus = 40 ml). Aplicati dezinfectantul pe toata suprafata ce trebuie dezinfectata prin stergere sau imersie/scufundare si lasati sa produsul sa actioneze.



Proprietatile produsului

Proprietatile fizice si chimice

Stare fizica: limpede, lichid usor vascos

Culoare: Verde

Parfum: "Ocean fresh"

Valoare pH: 9.8 - 11.8

Valabilitate: 36 luni

Compozitie la 100 g

13.9 g N,N-bis(3-aminopropil)dodecilamina, surfactant anionici, surfactant neionici, potentator de curatare, parfum, coloranti

PERICOL

H290 – Poate fi coroziv pentru metale **H302** – Nociv in caz de inghitire. **H315** Provoaca iritari al pielii. **H318** Provoaca leziuni oculare grave. **H373.8** – Poate provoaca lezuni ale rinichilor in caz de expunere prelungita sau repetata prin inghitire. **H410** – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P280.1 – Purtați mănuși de protecție, îmbracaminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. **P301 + P312**- În caz de înghițire, sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine. **P302+P352** – In caz de contact cu pielea spalați cu multa apa și sapun. **P305+P351+P338** - In caz de contact cu ochii clatiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. **Continuați să clatiți P332+P313** -In caz iritare a pielii, consultați medicul. **P501** – Eliminați conținutul / recipientul respectând reglementările în vigoare.

**Compatibilitate****Compatibilitatea cu materialele**

Polietilena	Compatibil.
Polipropilena	Compatibil.
Clorura de polivinil	Compatibil.
Pavimente laminate	Compatibil.
Parchet, sigilat	Compatibil.
Placi ceramica	Compatibil.
Piatra naturala, lustruita/neteda	Compatibil.
Clorura de polivinil (moale)	Compatibil cu restrictii.
Lemn netratat	Nu este compatibil.
Folie aluminiu	Nu este compatibil.