

# L Y L - Z X C - U

## Lampă UV Mobilă de Sterilizare Cameră

### Manual Utilizator



Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului, vă rugăm să citiți manualul cu atenție și să-l aveți la îndemână, înainte de utilizare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm sunați la departamentul de vânzări ori cel post vânzări.

#### Dispozitivul generalități

Lampa de sterilizare cameră cu UV este mobilă de tip modular ce include brațul, ajustabil manual, mânerul de ajustare, temporizatorul, cadrul, etc., toate asamblate într-o lampă sterilizare cu ultraviolete, de 80W.

Sterilizarea este completată de lampa de sterilizare UVC instalată în sterilizator. Este utilă în malluri, clădiri de birouri, hoteluri, spitale și orice alte locuri unde este necesară dezinfectia aerului și suprafeței obiectelor.

#### Model Specificații:

L Y L - Z X C - U Sterilizator Mobil de Cameră cu UV

#### Parametrii de lucru

- 1) Radiație iluminare:  $\geq 170 \text{uw} / \text{cm}$
- 2) Lungime braț lampă: 580MM
- 3) Înălțime după asamblare: 650mm
- 4) Unghi ajustare braț luminos:  $0^\circ - 180^\circ$
- 5) Grosime tub lampă: U550MM
- 6) Tensiunea aplicabilă lămpii: 60W
- 7) Aria de aplicabilitate:  $10-80\text{M}^2$
- 8) lungimea de undă a radiației ultraviolete este de 253.7nm  
253.7nm+185nm
- 9) Tensiunea de alimentare: 60VA
- 10) Siguranța clasificării: aparține categoriei 1 tip B echipament obișnuit
- 11) Specificare model siguranță: Model: RF-20Tip: 5 \* 20MM2A2 (fiecare)
- 12) Lampa de sterilizare cu ultraviolete are caracteristici bune de start.  
Tensiune alimentare sub 220V cu start rapid și 10 secunde luminare.
- 13) Mărime dispozitiv: 275 \* 220 \* 720MM

#### Condiții normale de lucru

- a) Temperatura ambientală:  $5^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ ;
- b) Presiune atmosferică: 86Kpa-106Kpa;
- c) Alimentare: voltaj 220V  $\pm$  22V frecvență 50Hz  $\pm$  1Hz;
- d) Necorozibil la gaz, inflamabil și explozibil la expunere gaz;

#### Probleme ce necesită atenția

1. Modelele Smart / modele control prin telecomandă:  
apăsare butoane "switch / select", cu setare timp prin tablou de operare, ori prin utilizarea telecomenzii de control.

A. Operarea prin tabloul de control:

Apăsare buton de start sterilizare și apoi apăsare buton de start din nou pentru setare timp. După setare timp, indicatorul de lumină corespunzător pornește flashing-ul. Cam în jur de 15 secunde emite sunetul beep înainte de sterilizare. În acel interval operatorul trebuie să părăsească camera și să închidă ușa pentru o sterilizare mai bună. Unitul va începe sterilizarea în funcție de durata sunetului beep. (15/30/60 min este opțional, apăsare buton odată înseamnă 15 min, de două ori 30 min, de 3 ori 60 min)

B. Operarea prin telecomanda de control

Se apasă butonul ON/OFF și se setează timpul pe telecomanda de control în raport de varianta dorită. După setare timp, indicatorul luminos corespunzător pornește flash-urile. Sunt cam 15 secunde interval cu sunete înainte de a începe sterilizarea. În acel interval, operatorul trebuie să părăsească camera și să închidă ușa pentru o sterilizare mai bună. Unitul va începe sterilizarea în funcție de durata sunetului beep. (15/30/60 min este opțional, apăsare buton odată înseamnă 15 min, de două ori 30 min, de 3 ori 60 min). Telecomanda de control va închide unitul pentru încheierea operațiunii.



Atenționare

- 1) Oamenii, animalele se vor scoate din cameră pe durata sterilizării, razele UV pot afecta ochii și pielea umană.
- 2) Nu extindeți durata sterilizării.
- 3) Lampa trebuie curățată pentru sterilizare.
- 4) Dispozitivul se va feri de contact cu copii.


#### Ambalare și transport

Fiecare dispozitiv este împachetat în pungă de plastic și într-o cutie cu Certificatul de garanție și manualul de instrucție. Se utilizează linerii de spumă în cutie pentru a preveni defectarea pe durata transportului.

#### Garantie

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. În scopul unei bune experiențe de cumpărare cu noi va implementa servicii după vânzare pe baza complianței cu Ministerul Informației Industriale al Administrării Generale privind Supervizarea Calității, Inspecției și Carantinei.


## Instalarea si metoda de utilizare

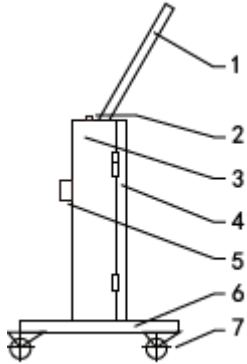

Numărul	Denumirea
1	braț lumină
2	buton
3	cabină
4	ușa de protecție
5	șnur manual
6	baza
7	rotare 360°

- Întâi se instalează baza (5) conform Figurii 1, apoi cutia pe basă, aliniată cu locașurile șuruburilor, care vor fi bine fixate după înfiletare.
  - Deschidere ușa de protecție (4), brațul fiind direct fixat în poziția dorită, apoi se instalează tubul în locașul lămpii și se rotează 90 grade.
  - Se pune ștecherul în priză, se deschide butonul (2), se setează timpul necesar, intervalul de timp fiind 0-60 min.
  - După utilizare, se apasă butonul ejector de retragere a brațului luminos, vă rugăm să țineți brațul luminos în momentul repunerii în locaș.
- Se închide ușa de protecție și se scoate din priză cablul de alimentare.


## Panel de control

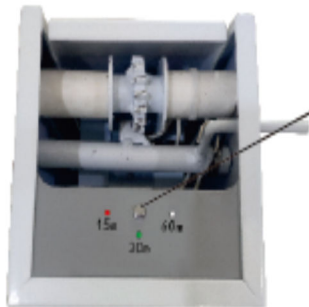

- Pe lumina roșie timpul de lucru 15 minute
- Se apasă de 2 ori pentru lumina verde timpul de lucru 30 minute
- Se apasă de 3 ori pentru lumina albă timpul de lucru 60 minute

## Diagrama schemei electrice

**Siguranța : BX2 \* 2AN ~ 220V/Switch/Timer/Lamp/Ballast**

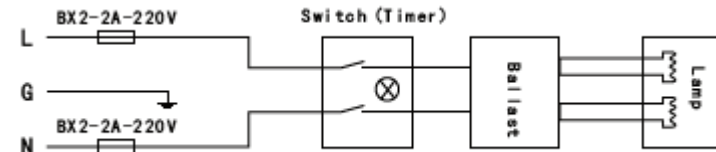

## Lista conținutului pachetului

Număr serial	Denumire	Cantitate
<b>I</b>	<b>cutie</b>	<b>una</b>
<b>II</b>	<b>2 seturi de bază</b>	<b>una</b>
<b>III</b>	<b>3 a copie manual</b>	<b>una</b>
<b>IV</b>	<b>4 a certificat de conformitate</b>	<b>una</b>
<b>V</b>	<b>5 seturi șuruburi</b>	<b>una</b>

## Soluții pentru defecțiuni comune

Căderi afișaj	Soluții căderi afișaj
Deschiderea este on, lampa germicidală este off	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificați siguranța dacă este căzută ori arsă. Dacă este căzută, strângeți soclul ori înlocuiți siguranța.</li> <li>Dacă există firul de contact.</li> <li>Realizați contactul între lampă și soclul de suport.</li> <li>Înlocuiți lampa.</li> </ol>
Lampa de sterilizare nu luminează Lumina nu e intensă	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reluați etapele de mai sus în ordine. Dacă lampa nu luminează, vă rugăm contactați electricianul profesional pentru reparare ori contactați producătorul. Dacă lampa nu luminează, vă rugăm contactați electricianul profesional pentru reparare ori contactați producătorul.</li> </ol>

## Garantie detalii

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. În scopul de a utiliza dispozitivul cu încredere și pentru o mai bună protecție a drepturilor și intereselor, compania noastră va implementa servicii după vânzare pe baza complianței cu Ministerul Informației Industriale al Administrării Generale privind Supervizarea Calității, Inspecției și Carantinei.

## Ce nu e inclus în service:

Dacă a trecut perioada de service efectiv ori perioada de mentenanță gratis cu privire la urmarea corectă a instrucțiunilor de utilizare, mentenanță și depozitare, ceea ce a determinat malfunctionarea ori stricăciuni consumatorilor cu dispozitivul, ori defecțiuni produs cauzate de factorii umani (cum ar fi erori operaționale, loviri, voltaj de alimentare neadecvat)

## [Card Garanție]

Număr produs:	Data cumpărării:
Dealer:	Nume utilizator:
Numar contact:	
Adresa utilizator:	



**Acest certificat este baza importantă a produsului pentru service post vânzare, vă rugăm păstrați-l în siguranță!**